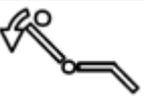
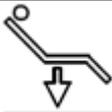
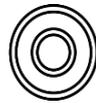
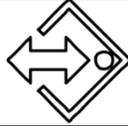
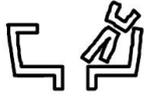


Controllo Poltrona

Pannello di controllo			
Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Azzeramento poltrona (automatico)		Risciacquo/Ultima posizione (automatico)	
Memory 1 (automatico)		Memory 2 (automatico)	
Blocco dei movimenti poltrona		<h1>OK</h1>	Tenere premuto il pulsante per circa 3sec. fino a che non si sente il segnale sonoro di conferma movimenti bloccati

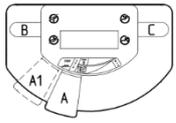
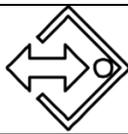
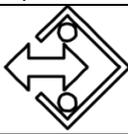
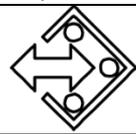
Pedaliera			
Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	

Controllo Riunito

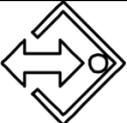
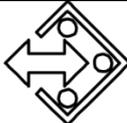
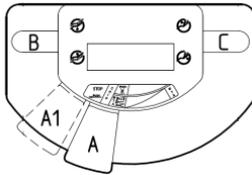
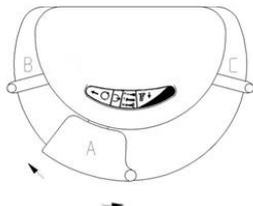
Pannello di controllo		
Lampada scialitica		
Riempimento bicchiere	(Breve pressione)	
Risciacquo bacinella	(Breve pressione)	
Apertura porta / Chiamata assistente		
Regolazione Ora / Data		

Pedaliere
I comandi della pedaliere possono essere modificati in fase di installazione

Controllo Tavoletta Strumenti

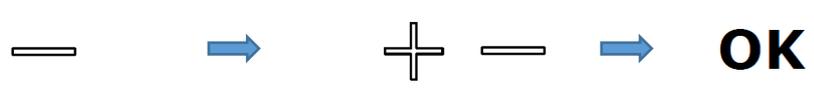
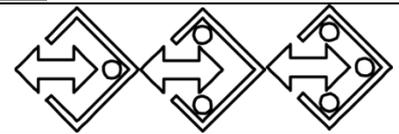
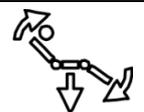
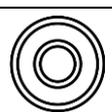
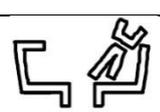
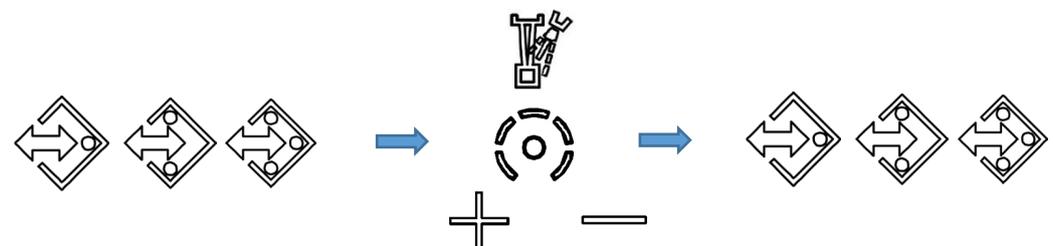
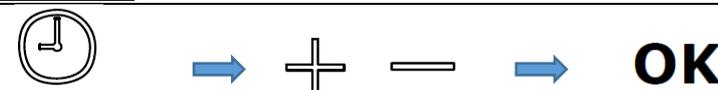
Pannello di controllo			
Profilo utente	     		
	Premere finchè "CURRENT USER No." appare	Modifica il valore	
Spray Clean Spray		Chip Blower Premere Leva A 	Luce fibra ottica 
Aumentare/Diminuire il parametro (potenza, rpm, coppia, etc.)	 	Conferma Parametro OK	
Turbine			
Comando velocità o potenza fissa / progressiva			
Ablatore (L'abilitazione delle funzioni SCALER, PERIO ed ENDO dipende dal modello di ablatore installato.)			
Funzione Scaler	Funzione Perio	Funzione Endo	
			

Controllo strumenti

Pannello di controllo			
Micromotore			
Memory 1		Memory 2	
Memory 3		Comando velocità o potenza fissa / progressiva	
			
Micromotore Brushless			
Memory 1		Memory 2	
Memory 3		Comando velocità o potenza fissa / progressiva	
		(*) Modalità Fast	FAST
(*) Modalità Auto Forward		(*) Modalità Auto Reverse	AUTO REVERSE
AUTO FORWARD		(*) Trasmissione Ratio	RATIO 1X
		(*) Coppia massima	TORQUE
Inversione della direzione di rotazione			
Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra e premerla verso il basso finché non si sente un segnale acustico.			
Inversione della direzione di rotazione			
Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra finché non si sente un segnale acustico.			

(*) Solamente per micromotori brushless abilitati

Programmazione

Pannello di controllo	
Settaggio Profilo Utente	
<p>Profilo utente</p>  <p>Premere finché "CURRENT USER No." appare Modifica il valore Accetta nuovo valore</p>	
Settaggio poltrona	
<p>Memory 1-2-3 (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata.</p>
<p>Azzeramento Poltrona (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione zero del pantografo.</p>
<p>Posizione Risciacquo (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione risciacquo.</p>
Settaggio strumenti	
<p>Illuminazione strumenti</p>  <p>Modifica il valore Accetta il nuovo valore</p>	<p>Spray</p> 
Riempimento bicchiere e tempo di risciacquo	
<p>Riempimento bicchiere</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare al livello desiderato.</p>	<p>Risciacquo sputacchiera</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare quando il tempo di risciacquo desiderato è stato raggiunto.</p>
Settaggio Micromotori	
<p>Memory 1-2-3</p>  <p>Selezionare programma Modificare il valore Premere per alcuni secondi (beep)</p>	
Settaggio orologio e data	
<p>Orologio e data</p>  <p>Modifica il valore Accetta il nuovo valore</p>	