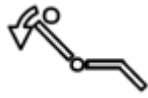

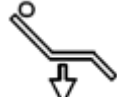
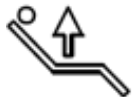







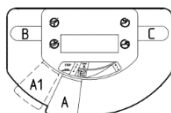
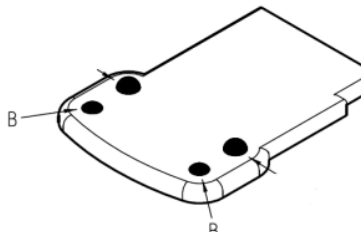
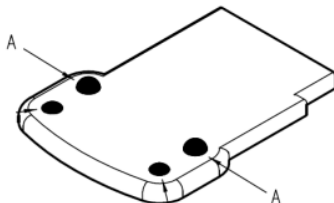



Controllo Poltrona

Pannello di controllo			
Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Azzeramento poltrona (automatico)			
Memory 1 (automatico)		Memory 2 (automatico)	

Pedaliera			
Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Bloccaggio movimenti poltrona		Spostare la leva A1 verso sinistra e premere verso il basso.	


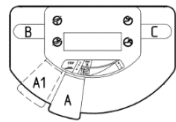

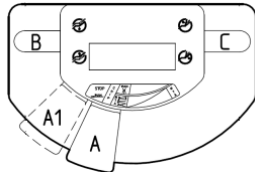
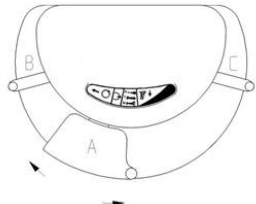
Basamento Poltrona	
Richiama la memoria precedentemente attivata (automatico)	
Azzeramento poltrona (automatico)	

Controllo Riunito


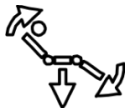
Pannello di controllo	
Chiamata infermiera	

Pedaliere
I comandi della pedaliere possono essere modificati in fase di installazione

Controllo Tavoletta Strumenti

Pannello di controllo					
Spray Clean Spray		Chip Blower Premere Leva A		Luce fibra ottica	
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliere verso sinistra e premerla verso il basso finché non si sente un segnale acustico.					
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliere verso sinistra finché non si sente un segnale acustico.					

Programmazione

Pannello di controllo		
Settaggio poltrona		
Memory 1-2 (automatico)		Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata.
Azzeramento Poltrona (automatico)		Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione zero del pantografo.