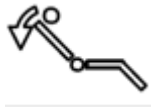

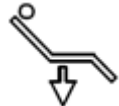

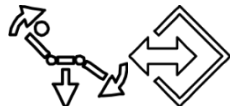





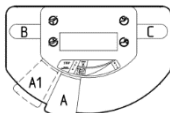




## Controllo Poltrona

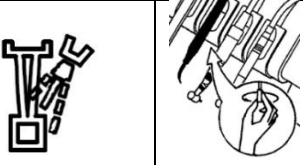

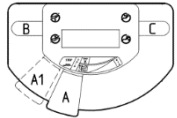

Pannello di controllo			
<b>Salita schienale</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)		<b>Discesa schienale</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)	
<b>Discesa pantografo</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)		<b>Salita pantografo</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)	
<b>Azzeramento poltrona</b> (automatico)	La prima selezione azzerava la poltrona; ripremendo il pulsante richiama la posizione 1 della memoria.		
<b>Risciacquo/Ultima posizione</b> (automatico)			

Pedaliera			
<b>Discesa schienale</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)		<b>Salita schienale</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)	
<b>Discesa pantografo</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)		<b>Salita pantografo</b> Tenere premuto il pulsante (manuale)	
<b>Bloccaggio movimenti poltrona</b>		Muovere la leva A1 verso sinistra e premere verso il basso.	

## Controllo Riunito

Pannello di controllo		
<b>Riempimento bicchiere</b>	(Breve pressione)	
<b>Risciacquo bacinella</b>	(Breve pressione)	

# Controllo Tavoletta Strumenti

Pannello di controllo		
Spray Clean Spray		Luce fibra ottica 
Chip Blower Premere Leva A		
<u>Micromotore</u>		
Inversione direzione di rotazione		

# Programmazione

Pannello di controllo		
<u>Settaggio poltrona</u>		
Azzeramento poltrona /memorizzazione posizione (automatico)	Per memorizzare la posizione 1, azzerare la memoria, posizionare la poltrona nella configurazione desiderata e tenere premuto il pulsante finché si sente un segnale sonoro che indica che la posizione è stata salvata.	