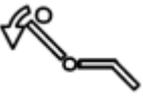
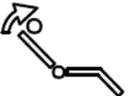
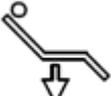
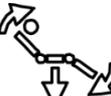
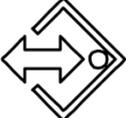
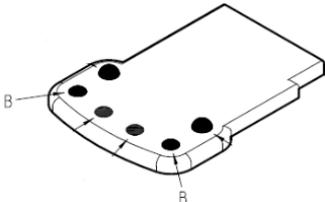
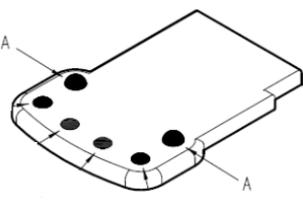



Controllo Poltrona

Pannello controllo	
Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Azzeramento poltrona (automatico)	
Risciacquo/Ultima posizione (automatico)	
Memory 1 (automatico)	
Memory 2 (automatico)	
Memory 1 (automatico)	
Blocco dei movimenti poltrona	<p style="text-align: center;">OK</p> <p>Tenere premuto il pulsante per circa 3sec. fino a che non si sente il segnale sonoro di conferma movimenti bloccati</p>
Rotazione poltrona	<p style="text-align: center;">+</p> <p>Per sbloccare la rotazione della poltrona, premere il pulsante e ruotare la poltrona nella direzione desiderata. (oraria o antioraria)</p>

Pedaliera	
Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	

Basamento poltronma	
Richiamo memoria preventivamente attivata. (automatico)	
Azzeramento poltrona (automatico)	

Posizione risciacquo/Ultima posizione (automatico)

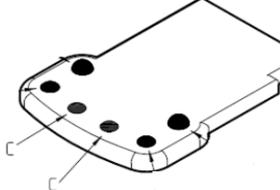




Controllo Riunito

Pannello di controllo			
Lampada scialitica			
Riempimento bicchiere		(Breve pressione)	
Risciacquo bacinella		(Breve pressione)	
Apertura porta / Chiamata assistente		Apertura porta / Chiamata assistente	
Regolazione Ora / Data		Regolazione Ora / Data	

Pedaliera

I comandi della pedaliera possono essere modificati in fase di installazione

Controllo Tavoletta Strumenti

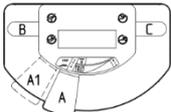
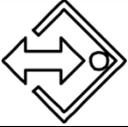
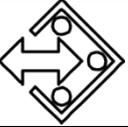
Pannello di controllo					
Profilo utente					
 		  			
Premere finchè "CURRENT USER No." appare		Modifica il valore			
OK					
Spray Clean Spray 		Chip Blower Premere Leva A 		Luce fibra ottica 	
Aumentare/Diminuire il parametro (potenza, rpm, coppia, etc.)  		Conferma Parametro		OK	
Turbine					
Comando velocità o potenza fissa / progressiva 					
Ablatore (L'abilitazione delle funzioni SCALER, PERIO ed ENDO dipende dal modello di ablatore installato.)					
Funzione Scaler 		Funzione Perio 		Funzione Endo 	

Controllo strumenti

Pannello di controllo					
Micromotore					
Memory 1		Memory 2		Memory 3	
Comando velocità o potenza fissa / progressiva					
Micromotore Brushless					
Memory 1		Memory 2		Memory 3	
Comando velocità o potenza fissa / progressiva		(*) Modalità Fast	FAST	(*) Modalità Auto Reverse	AUTO REVERSE
(*) Modalità Auto Forward	AUTO FORWARD	(*) Trasmissione Ratio	RATIO 1X	(*) Coppia massima	TORQUE
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra e premerla verso il basso finché non si sente un segnale acustico.					
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra finché non si sente un segnale acustico.					

(*) Solamente per micromotori brushless abilitati

Programmazione

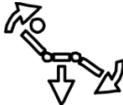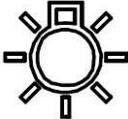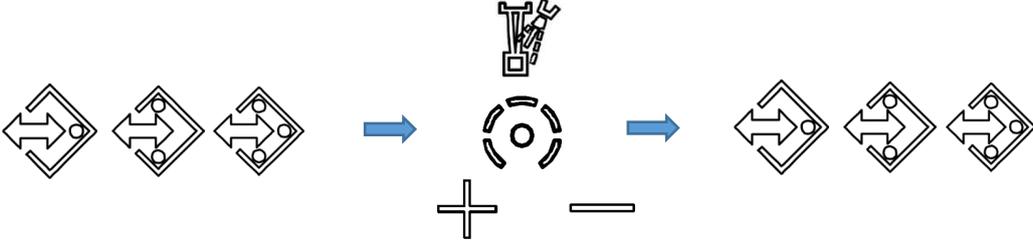Pannello di controllo	
Settaggio Profilo Utente	
<p>Profilo utente</p> <p style="text-align: center;">       </p> <p style="text-align: center;"> Premere finché "CURRENT USER No." appare Modifica il valore Accetta nuovo valore </p>	
Settaggio poltrona	
<p>Memory 1-2-3 (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata.</p>
<p>Azzeramento Poltrona (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione zero del pantografo.</p>
<p>Posizione Risciacquo (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione risciacquo.</p>
Settaggio strumenti	
<p>Illuminazione e strumenti</p>  <p style="text-align: center;">      </p> <p style="text-align: center;"> Modifica il valore Accetta il nuovo valore </p>	<p>Spray</p> 
Riempimento bicchiere e tempo di risciacquo	
<p>Riempimento o bicchiere</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare al livello desiderato.</p>	<p>Risciacquo sputacchiera</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare quando il tempo di risciacquo desiderato è stato raggiunto.</p>
Settaggio Micromotori	
<p>Memory 1-2-3</p>  <p style="text-align: center;"> Selezionare programma Modificare il valore Premere per alcuni secondi (beep) </p>	
Settaggio orologio e data	
<p>Orologio e data</p>  <p style="text-align: center;">      </p> <p style="text-align: center;"> Modifica il valore Accetta il nuovo valore </p>	