

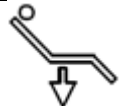

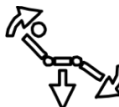












Controllo Poltrona

Pannello di controllo			
Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Azzeramento poltrona (automatico)		Risciacquo/Ultima posizione (automatico)	
Memory 1 (automatico)		Memory 2 (automatico)	
Memory 1 (automatico)		Blocco dei movimenti poltrona 	
Rotazione poltrona		Tenere premuto il pulsante per circa 3sec. fino a che non si sente il segnale sonoro di conferma movimenti bloccati Per sbloccare la rotazione della poltrona, premere il pulsante e ruotare la poltrona nella direzione desiderata. (oraria o antioraria)	

Pedaliera			
Discesa schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita schienale Tenere premuto il pulsante (manuale)	
Discesa pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)		Salita pantografo Tenere premuto il pulsante (manuale)	

Controllo Riunito

Pannello di controllo		
Lampada scialitica		
Riempimento bicchiere	(Breve pressione)	
Risciacquo bacinella	(Breve pressione)	
Apertura porta / Chiamata assistente		
Regolazione Ora / Data		







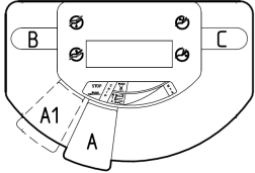
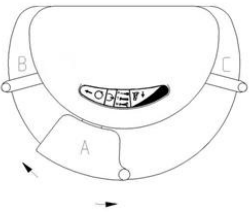
Pedaliere

I comandi della pedaliera possono essere modificati in fase di installazione

Controllo Tavoletta Strumenti


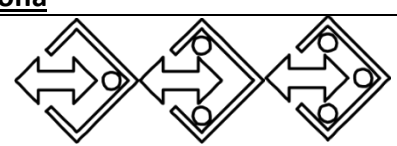
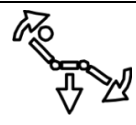

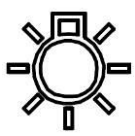
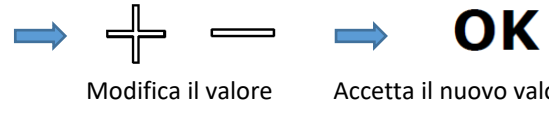


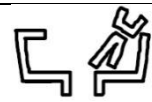
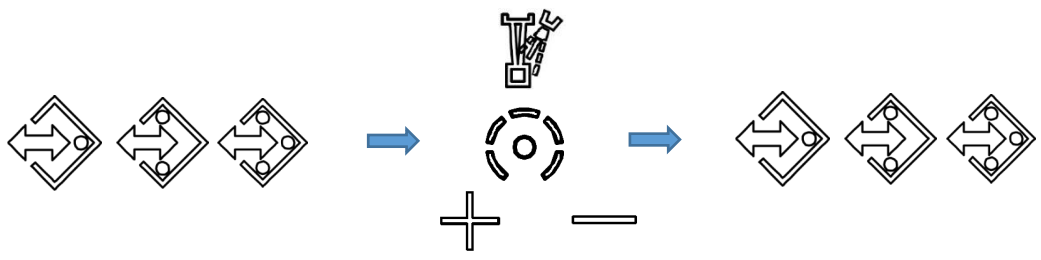
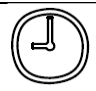
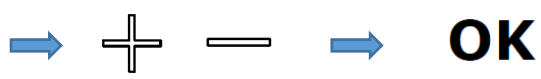
Pannello di controllo		
Profilo utente	→ →	<p>Premere finchè "CURRENT USER No." appare Modifica il valore Accetta nuovo valore</p>
Spray Clean Spray		Chip Blower Premere Leva A
		Luce fibra ottica
Aumentare/Diminuire il parametro (potenza, rpm, coppia, etc.)		Conferma Parametro OK
Turbine		
Comando velocità o potenza fissa / progressiva		
Ablatore (L'abilitazione delle funzioni SCALER, PERIO ed ENDO dipende dal modello di ablatore installato.)		
Funzione Scaler	Funzione Perio	Funzione Endo

Controllo strumenti

Pannello di controllo				
Micromotore				
Memory 1		Memory 2		Memory 3
Comando velocità o potenza fissa / progressiva				
Micromotor Brushless				
Memory 1		Memory 2		Memory 3
Comando velocità o potenza fissa / progressiva				
(*) Modalità Auto Forward	AUTO FORWARD	(*) Modalità Fast	FAST	(*) Modalità Auto Reverse
(*) Modalità Auto Forward	AUTO FORWARD	(*) Trasmissione Ratio	RATIO 1X	(*) Coppia massima
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra e premerla verso il basso finché non si sente un segnale acustico.				
Inversione della direzione di rotazione Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra finché non si sente un segnale acustico.				

(*) Solamente per micromotori brushless abilitati

Programmazione

Pannello di controllo	
Settaggio Profilo Utente	
<p>Profilo utente</p>  <p>Premere finché "CURRENT USER No." appare Modifica il valore Accetta nuovo valore</p>	
Settaggio poltrona	
<p>Memory 1-2-3 (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata.</p>
<p>Azzeramento Poltrona (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione zero del pantografo.</p>
<p>Posizione Risciacquo (automatico)</p> 	<p>Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto finché non si sente un segnale acustico che indica che la posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio della posizione risciacquo.</p>
Settaggio strumenti	
<p>Illuminazione e strumenti</p>   <p>Modifica il valore Accetta il nuovo valore</p>	<p>Spray</p> 
Riempimento bicchiere e tempo di risciacquo	
<p>Riempimento o bicchiere</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare al livello desiderato.</p>	<p>Risciacquo sputacchiera</p>  <p>Premere per 3 secondi e rilasciare quando il tempo di risciacquo desiderato è stato raggiunto.</p>
Settaggio Micromotori	
<p>Memory 1-2-3</p>  <p>Selezionare programma Modificare il valore Premere per alcuni secondi (beep)</p>	
Settaggio orologio e data	
<p>Orologio e data</p>   <p>Modifica il valore Accetta il nuovo valore</p>	